

ANLEITUNG PCR-POOLTESTUNGEN: MATERIALÜBERSICHT UND ABLAUFBESCHREIBUNG

MATERIALÜBERSICHT:

1.



1 Lolli-PCR-Abstrichtupfer pro KiTa-Kind.

2.



1 Schraubgefäß pro Pool-Testung.

4.



1 Barcode für das Schraubgefäß pro Pool-Testung – „Poolprobe“
Die Gruppen auf den Barcodes sind fortlaufend nummeriert (1 – n); Bitte dokumentieren Sie, welche Barcode-Bezeichnung Sie Ihren Gruppen zuordnen.
Ab 26 oder mehr zu testenden Personen wird einer zweiter Pool gebildet.

3.



1 Plastiktüte für alle Schraubgefäße Ihrer KiTa pro Tag.

5.



1 QR-Code für die Befundabfrage der Pool-Testung – „Poolbefund“.

ABLAUFBESCHREIBUNG

Pooltestungen

1.




Bitte ziehen Sie sich Handschuhe an und fügen alle Lolli-Abstrichtupfer aus einer Pool-Testung gesammelt in das beiliegende große Schraubgefäß und verschließen dieses.

Pooltestungen

2.



Bekleben Sie dieses Schraubgefäß senkrecht und zentral mit dem mitgelieferten Barcode „Pool-Probe“ für die Pool-Tests. Bitte verkleben Sie **nicht** den Verschluss.

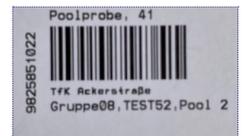

Pooltestungen

3.



Bitte legen Sie alle Schraubgefäße Ihrer KiTa gesammelt in **eine Plastiktüte** (und dann in die entsprechende Transportbox).

Einzeltestungen

4.



Sofern Sie PCR-Einzeltestungen Ihrer KiTa-Kinder erhalten, bitten wir Sie, diese Lolli-Abstrichtupfer für die Einzeltestung in den jeweiligen Plastiktüten gesammelt in **eine** Plastiktüte zu legen.

Einzeltestungen

5.



Beschriften Sie auch diese Plastiktüte mit dem Namen Ihrer KiTa, der Gruppe und dem Datum.

Pool- **und** Einzeltestungen

6.



Die Box ist nun abholbereit.

Pooltestungen

7.

LABUNIQ

Befundabfrage: Wir empfehlen die Befundabfrage im Portal durch den/die Corona-Beauftragte/n Ihrer KiTa.

Alternativ: Scannen Sie den Barcode „Poolbefund“, um das Ergebnis abrufen zu können.

